

BloodSpot IgG4 Anticorpos Alimentares 30 Antigenos

O BloodSpot IgG4 Anticorpos Alimentares corresponde a um teste que medirá os níveis totais de IgG4 com as reações mais comuns a 30 Antigenos Alimentares. O teste é simples e pode ser realizado pelo próprio paciente em suas residências.

Preparação do Paciente

- Não é necessário estar em jejum.
- O uso de drogas imunossupressoras, como a cortisona, pode atrapalhar os resultados do exame. Deixe de utilizar determinados medicamentos 60 dias antes do exame para que as reações dos anticorpos sejam visíveis.
- Não é necessário interromper o uso dos suplementos alimentares para o teste. Anormalidades seriam detectadas caso existisse uma necessidade de dieta ou suplementação.

Kit de Materiais

- 1 Cartão coletor por absorção

Modo de Coleta

Fazer a assepsia na região a ser coletada amostra (ponta do indicador), com uma agulha furar o local, colocar a gota de sangue no cartão coletor preenchendo todos os espaços dos círculos, não deixando ultrapassar suas extremidades. Preencher nome completo, data de nascimento e data da coleta. Colocar no saquinho apropriado e enviar no endereço abaixo:

Health Metrix

Av. Eng. Luiz Carlos Berrine, 1500, 9º. And. Brooklin São Paulo – SP – 04571-000

Dúvidas entrar em contato no tel. (11) 5507-2150 ou atendimento@healthmetrix.com.br