

IgG4 Anticorpos Alimentares 90 Antigenos

Descrição

O Allergix IgG4 anticorpos Alimentares é relacionado com as reações tardias ou não tóxicas dos alimentos que contribuem para diferentes problemas relacionados á saúde. Simultâneos a altos níveis, o IgG4 anticorpos alimentares é geralmente associado com hipersensibilidade intestinal. Esse perfil mede os níveis de soro no IgG4 que reagem com 90 tipos de alimentos diferentes, inclusive alimentos consumidos tradicionalmente, como milho, leite, ovos e trigo. Um guia de reações por alimentos é passado ao paciente como o resultado de análise.

Requerimento de Espécime

Soro 3 – 9 ml (Por Instrução) **Congelar**

Preparação do Paciente

- Não é necessário estar em jejum.
- O uso de drogas imunossupressoras, como a cortisona, pode atrapalhar os resultado do exame. Deixe de utilizar determinados medicamentos 60 dias antes do exame para que as reações dos anticorpos sejam visíveis.
- Não é necessário descontinuar o uso de suplementos alimentares ou hormonais. Anormalidades revelarão necessidades especiais que não são supridas pela dieta e suplementos que o paciente ingere.

Kit de Materiais

- 1 tubo a vácuo com tampa vermelha e cinza com soro
- 1 tubo para transferência
- 1 Pipeta
- 2 Gelos para refrigeração



Modo de Coleta do Soro

1. **Colete** o sangue no tubo a vácuo de tampa vermelha / cinza;
2. **Coagule** o sangue deixando o tubo em posição vertical em temperatura ambiente por 20 minutos;
3. **Centrifugue** o tubo a vácuo por 10 a 15 minutos para evitar hemólise. O soro deverá estar livre de hemólises ou células vermelhas.
4. **Pipete** 3ml de soro no tubo a vácuo e transfira para o tubo de tampa vermelha. Transfira 6ml quando o exame solicitado for IgG4 com IgE ou IgG4 com perfil Celiaco;
5. **Refrigere** o tubo com soro e congele os bags de gelo até o envio.

Endereço a Health Metrix

**Av. Eng. Luiz Carlos Berrine, 1500, 9º. And. Brooklin São Paulo – SP –
04571-000**